

How-to-Treppenlift

Benötigt wird

- Treppenlift-Schlüssel (im Büro oder in Schrank 3)
- Eine Person, die den Treppenlift bedient & Türen aufmacht

1. Bedienung

Die Schutzhülle abnehmen, dafür die Klettverschlüsse lösen und die Hülle nach oben heben.

Schlüssel in Wandschalter stecken


Knopf 4 so lange drücken und gedrückt halten, bis sich die Plattform ganz aufgeklappt hat.



Die Plattform ist dann ganz aufgeklappt, wenn sich die Plattform in Position 1 befindet und sich nicht mehr bewegt. Die vordere Klappe und die vordere Sicherungsstange sind offen, die hinteren sind geschlossen. (Position 1)

a. Fahrt nach unten

Die Person im Rolli kann auf die Plattform. Der Rolli sollte in Fahrtrichtung stehen. Bei Elektrorollis ist drauf zu achten, dass nicht gegen die hintere Klappe gefahren wird. Wenn der Rollstuhl auf der Plattform steht muss die Bremse angezogen werden, bevor der Lift bewegt wird

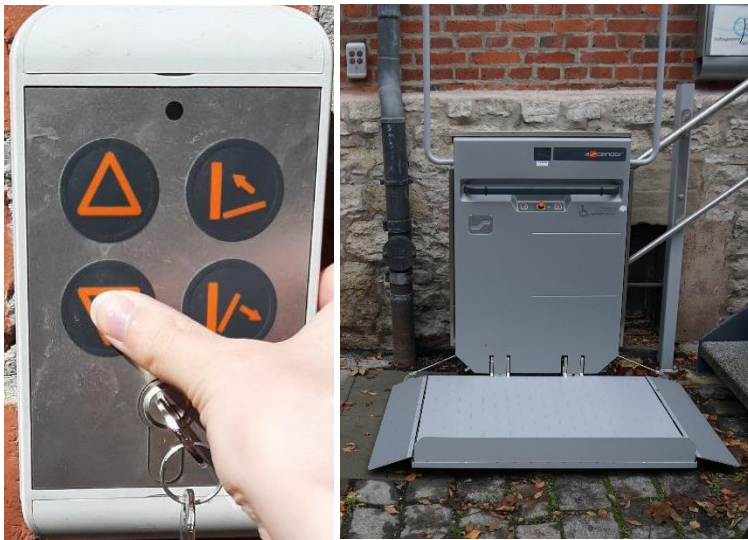

Jetzt wird der Knopf mit dem Pfeil nach unten (2) gedrückt

Der Lift klappt die vordere Sicherungsstange herunter und die vordere Klappe nach oben, danach fährt der Lift nach unten, aber nur solange die Taste gedrückt gehalten wird

Wenn der Lift unten angekommen ist, öffnen sich beide Klappen und beide Sicherungsstangen (Position 2)

b. Fahrt nach oben

(Wenn unten gestartet werden soll, muss die Plattform wie in a. beschrieben, aber ohne Rolli nach unten gefahren werden.)

Plattform muss in der unteren Position (Position 2) befinden. Der Rolli fährt auf die Plattform, Blickrichtung in Fahrtrichtung. Wenn der Rollstuhl auf der Plattform steht muss die Bremse angezogen werden, bevor der Lift bewegt wird.



Der Knopf mit dem Pfeil nach oben (Knopf 1) wird solange gedrückt gehalten, bis die Plattform oben in Position 1 angekommen ist.

Der Rolli kann von der Plattform auf die Treppe fahren.

c. Treppenlift zuklappen und ausschalten



Der Treppenlift muss wieder in Position 1 sein. Dann kann der Knopf Plattform einklappen (Knopf 3) gedrückt werden, bis sich der Treppenlift wieder ganz eingeklappt hat, sich also trotz drücken nicht mehr bewegt.

Dann kann der Schlüssel wieder ganz nach links gedreht und entnommen werden. Auf den Lift soll wieder die Hülle gezogen werden, wenn er nicht kurz danach wieder benutzt wird.

2. Der Treppenlift




Ohne
Schutzhülle



Mit Schutzhülle

3. Positionen Wandschalter

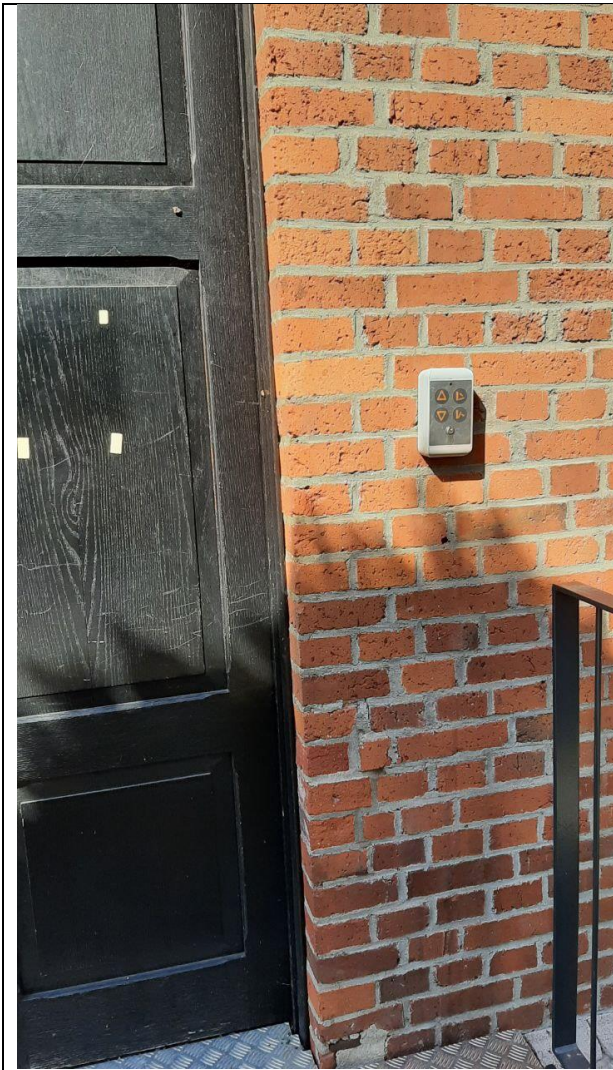

Wandschalter oben



Wandschalter unten





4. Wandschalter Funktionen




Beide Wandschalter funktionieren gleich, es kann also einfach einer ausgesucht werden

Der Schlüssel muss ins Schloss gesteckt werden und nach rechts gedreht werden, bis er sich nicht weiter drehen lässt

Jeder Knopf muss so lange gedrückt gehalten werden, bis sich der Lift nicht mehr bewegt

	<p>Knopf 1 Führt den Lift von unten (Position 2) nach oben (Position 1)</p>		<p>Knopf 3 Schließt die Plattform, dazu soll der Lift in Position 1 stehen</p>
	<p>Knopf 2 Führt den Lift von oben (Position 1) nach unten (Position 2)</p>		<p>Knopf 4 Öffnet die Plattform, danach ist der Lift in Position 1</p>

5. Lift Positionen

	<p>Ausgangs- und Endposition Zusammengeklappt</p>
--	---



Position 1
Plattform ausgeklappt
Vordere Klappe und Sicherungsstange
sind offen



Position 2
Plattform ausgeklappt
Beide Klappen und Sicherungskappen
sind offen

6. Weitere Infos

Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 225kg



Es darf nur eine Person inklusive Rollstuhl gleichzeitig auf dem Lift fahren

Am Treppenlift befinden sich ebenfalls Bedienelemente, die aber nur wenn der Lift aufgeklappt ist zugänglich sind. Diese können auch zum fahren des Lifts benutzt werden

Der rote Knopf ist der Not-Aus-Knopf. Dieser sollte nur im Notfall betätigt werden. Wenn der Knopf betätigt wurde, kann er durch drehen nach links wieder gelöst werden.



Die Eingangstür kann mit dem Tür-Stopper offengehalten werden



Die zweite Seite der Tür kann durch Umklappen der zwei Hebel geöffnet werden, der obere Hebel ist aber für kleinere Personen schlecht erreichbar.